

LIPOCELL CRI❄️360



**Elimina adiposidad localizada
o tejido adiposo en pocas sesiones**

¿De qué se trata el equipo?

Lipocell Crio 360 trabaja mediante la terapia de criolipólisis, la misma es considerada como un procedimiento no invasivo que utiliza el frío controlado y localizado para tratar adiposidad localizada.

BENEFICIOS

- * Elimina la adiposidad localizada.
- * Una alternativa a los procedimientos invasivos con alto riesgo intraoperatorio.
- * Se necesitan pocas sesiones para alcanzar los objetivos terapéuticos.
- * Se observan resultados desde la primera sesión.
- * Simple y eficiente, su sencilla interfaz permite la aplicación segura y eficaz.



¿Cómo es el tratamiento?

El equipo succiona la zona a tratar con una presión negativa, que acerca el tejido adiposo y lo enfría simultáneamente, a menos de 5°C.

El enfriamiento genera una disminución del calibre de los vasos sanguíneos de la piel, fenómeno denominado vasoconstricción.

Esto genera disminución del flujo sanguíneo del tejido, falta de oxígeno, estrés oxidativo de las células y, finalmente, muerte de los adipocitos.



Nuevos cabezales 360°

En esta nueva entrega, nuestros cabezales se llaman **360°** debido a que la totalidad de la copa del cabezal posee la capacidad de enfriamiento.

De esta manera, el enfriamiento es uniforme sobre toda la superficie de tratamiento, potenciando los efectos reductores de la terapia.




¿Que zonas se pueden tratar?

- * Con la criolipólisis con LIPOCELL CRIO 360 se puede tratar con seguridad las zonas del cuerpo, como abdomen, flancos, muslos y brazos.
- * El tratamiento es ideal para personas que desean eliminar adiposidad localizada de forma precisa y efectiva.

¿Qué resultados se obtienen?

El resultado obtenido es la disminución de la adiposidad localizada. Los resultados se objetivan desde la primer aplicación, luego de 30 a 60 días, tiempo que le lleva a nuestro cuerpo eliminar las células adiposas. Con cada sesión se reducen hasta un 20% del tamaño del pliegue cutáneo.

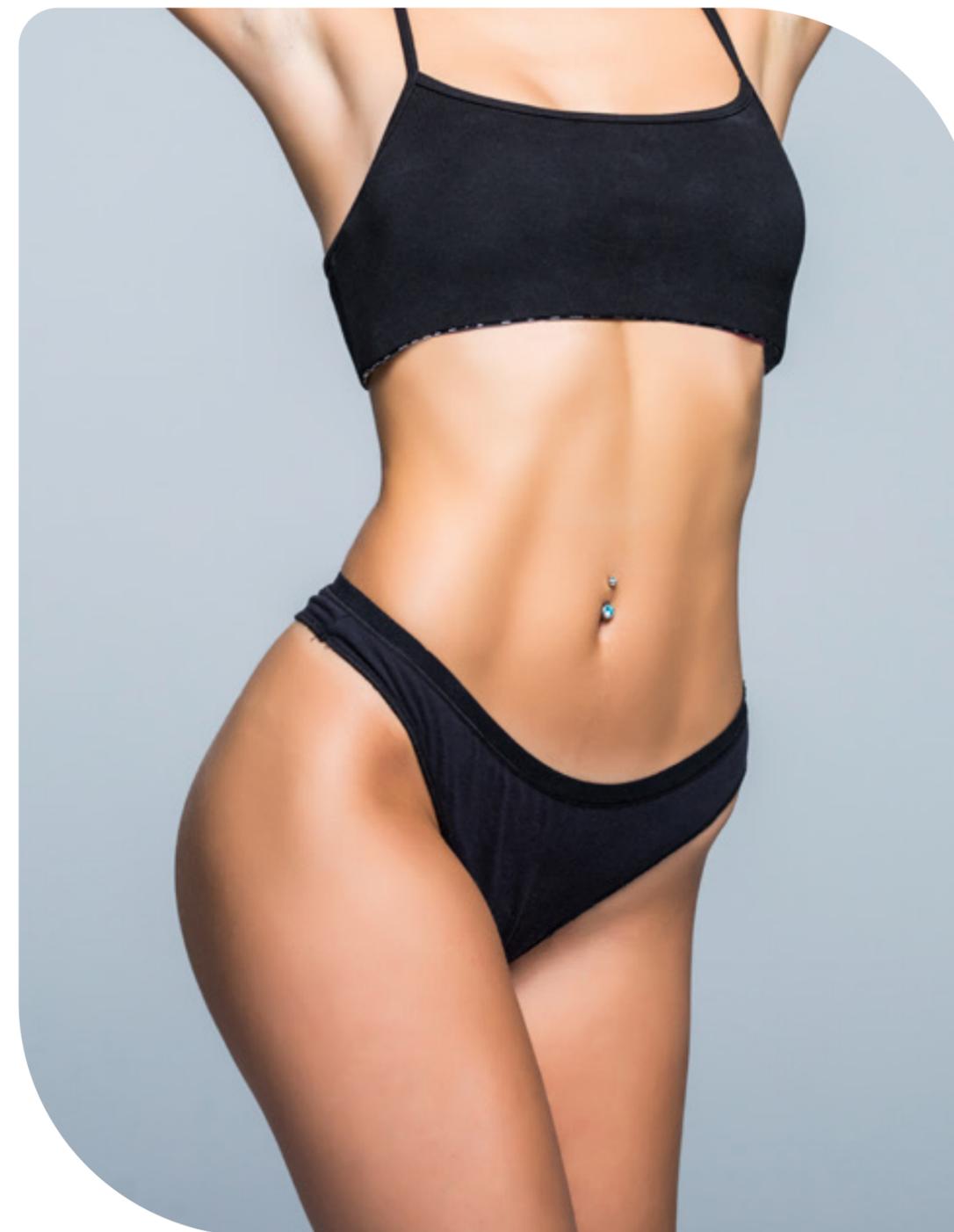

¿Quienes pueden realizarse el tratamiento?

Hombres y mujeres mayores de edad, con adiposidad localizada o ligero sobrepeso no mayor a 12 kg-15 kg.

❄ Cuidados previos

No requiere. Antes de iniciar la sesión, la piel debe estar limpia y seca, y se debe colocar un paño anticongelante entre la piel del área a tratar y el cabezal de succión del equipo.

❄ Cuidados posteriores

Para potenciar los efectos buscados con la criolipólisis, se debe recomendar al paciente tomar 2 litros de agua por día, realizar una dieta baja en grasas, y practicar actividad física regular.



Combinación con otras terapias

Inmediatamente posterior a la aplicación solo se recomiendan terapias como drenaje linfático, botas de presoterapia, mecanoterapia (ej, terapia con rodillos como la que posee Bio Roll), cuyo objetivo principal será estimular la circulación sanguínea de la zona tratada.

A las 72 hs posterior al tratamiento, se puede combinar con una gran variedad de terapias, tales como pulsos magnéticos focalizados (Mio Up), radiofrecuencia, radiofrecuencia con succión (Alpha Synergy), radiofrecuencia fraccionada (Zephyr Evolution), HIFU 7D, entre otros.





Starbene

www.starbene.com

[f](#) [@](#) [@](#) [@](#) [@starbenecom](#)